

# PORODO LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

**مضخة الثدي الآلية  
القابلة للارتداء**

SKU: PD-LFST016

٢	المميزات
٢	المواصفات
٣	إخلاء المسؤولية
٣	التحذيرات
٤	نظرة عامة على المنتج
٤	التنظيف والتطهير
٥	تعليمات التشغيل
٦	دليل التجميع
٧	أوضاع مختلفة مناسبة
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

- ١. تصميم بدون استخدام اليدين: مضخة الثدي صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، وتلائم حمالة الصدر بشكل خفي لاستخراج الحليب بسهولة وبدون استخدام اليدين.
- ٢. بدون أنابيب أو زجاجات رضاعة: مصممة بدون أنابيب خارجية أو أسلاك أو زجاجات، مما يوفر تجربة ضخ مبسطة وخالية من الفوضى.
- ٣. للاستخدام في أي مكان وفي أي وقت: محمولة ومتعددة الاستخدامات، مما يسمح باستخراج الحليب في أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى التخطيط المسبق.
- ٤. جهاز متعدد الأغراض: سهل التجميع والتنظيف، هذا الجهاز المتكامل يبسط عملية الإعداد والصيانة.
- ٥. مصنوعة من مادة البولي بروبيلين والسييليكون الصالحة للطعام، وخالية من مادة BPA: مصنوعة من مواد آمنة وعالية الجودة وخالية من مادة BPA والمواد الكيميائية الضارة الأخرى، مما يضمن الاستخدام الآمن للأم والطفل.
- ٦. آمنة ومريحة وفعالة: تم تصميم مضخة الثدي هذه من مواد صديقة للبيئة، وتوفر طريقة استخراج حليب بسيطة وفعالة، مع جميع الأجزاء القابلة للفصل (باستثناء المحرك) آمنة لتطهير الماء المغلي.

## المواصفات

اسم المنتج	Porodo Lifestyle مضخة الثدي الآلية القابلة للارتداء
SKU	PD-LFST016
المدخل	تيار مستمر ه فولت/أمبير
سعة البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت إعادة الشحن	ساعتان
وقت العمل	٣ ساعات
واجهة الشحن	النوع C
حجم الحافة	٢٤ مم
سعة كوب التجميع	١٨٠ مل
وضع الاستخراج	التحفيز (ه مستويات)، الاستخراج (ه مستويات)، التدليك (ه مستويات)
وزن المنتج	٢٠٠ جرام
أبعاد المنتج	١٣٥ × ٧٢ × ١١٣ مم
الشهادات	CE, ROHS, CPC


نحن ملتزمون بتعزيز كفاءة الرضاعة الطبيعية وراحتها وراحتها للأمهات. يضمن تصميمنا المبتكر أنه حتى المبتدئين يمكنهم بسهولة استخدام مضخة الثدي لتلبية الاحتياجات الفريدة للأمهات المختلفة، مما يوفر حلاً أكثر أماناً وعملية وكفاءة. نسعى جاهدين لتقديم منتجات حمل مدروسة تلبي احتياجات كل أم. نحن ملتزمون بحماية وتغذية حليب الثدي، مع التركيز على حليب الثدي. نمزج بين جماليات التصميم والوظائف لضمان منتجات عالية الجودة. نأمل أن تعزز مضخة الثدي هذه تجربة الرضاعة الطبيعية الخاصة بك.

## تحذيرات


١. استخدم فقط المحول الأصلي المقدم؛ لا تستخدم محولات غير أصلية.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام.
٣. لا تقومي بتطهير أو غسل محرك المضخة ومحول الطاقة.
٤. إذا كان لديك إمداد منخفض من حليب الثدي، استخدم هذا المنتج فقط تحت إشراف طبيب أو أخصائي رعاية صحية.
٥. إذا لم يتم عصر حليب الثدي خلال ٥ دقائق، فتوقفي عن استخدام المضخة على الفور.
٦. استشير طبيبك أو أخصائي رضاعة طبيعية إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج أثناء الاستخدام.
٧. لا تستخدم مضخة الثدي أثناء الحمل.
٨. اغسلي يديك وجففيهما جيداً قبل تجميع الأجزاء.
٩. تجنب استخدام المنظفات القاسية أو المنتجات الكاشطة، حيث قد تخدش أو تتلف المنتج.
١٠. خزن المنتج في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
١١. استبدلي أي أجزاء تالفة على الفور.
١٢. استبدلي الصمام كل شهرين؛ يتوفر صمام احتياطي.
١٣. لا تستخدم فرشاة تنظيف على الصمام، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
١٤. نظراً لأن هذا منتج للعناية الشخصية، فلا تشاركه مع الآخرين.
١٥. تأكد من استخدام غطاء البوق الصحيح.
١٦. احتفظ بالملحقات بعيداً عن متناول الأطفال لمنع خطر الاختناق العرضي.

## نظرة عامة على المنتج



غشاء سيليكون

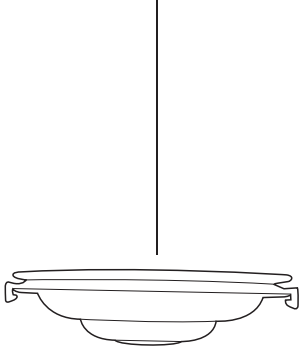


واقي صدر

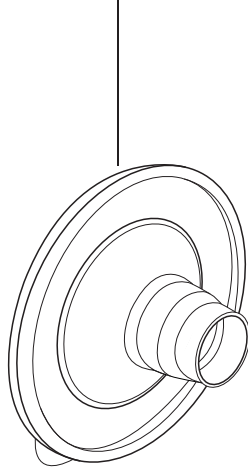


مضخة محرك

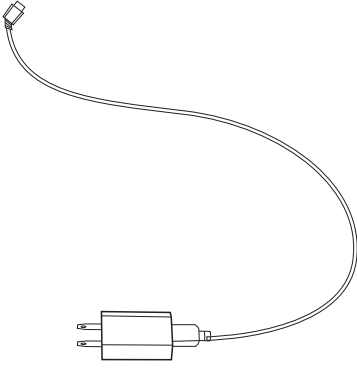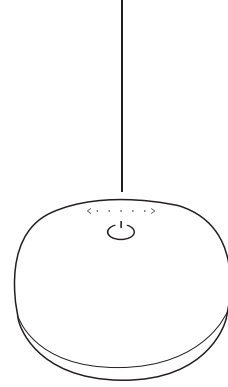


محول الطاقة

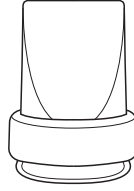

صمام

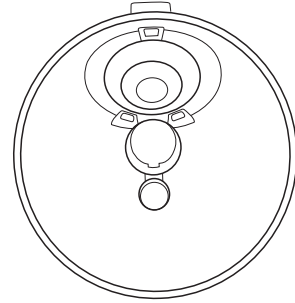

خزان التخزين

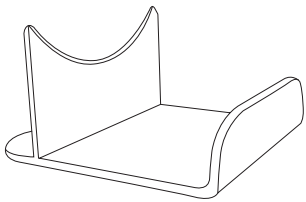

حامل مضخة الثدي

## التنظيف والتطهير

### [A] قبل الاستخدام الأول

١. قم بتفكيك جميع الملحقات.
٢. اغسلها بالماء الدافئ.
٣. اشطفها جيدًا.
٤. قم بتعقيم الملحقات عن طريق غليها لمدة ٥-٣ دقائق.
٥. استخدم مقلاة كبيرة لمنع الملحقات من ملامسة القاع أو الجوانب.

٦. ضع الملحقات على قطعة قماش نظيفة أو رف تجفيف لتجف في الهواء.
- ملاحظة:** مضخة المحرك هي مكون كهربائي ولا يمكن غسلها أو تطهيرها.

### [B] بعد الاستخدام

١. قم بتفكيك جميع الملحقات (باستثناء مضخة المحرك).
٢. اشطف الملحقات بالماء البارد فوراً بعد الاستخدام.
٣. اغسل الملحقات بالماء الدافئ.
٤. نظف غشاء السيليكون برفق بأصابعك.
٥. اشطفه جيداً.
٦. ضع الملحقات على قطعة قماش نظيفة أو رف تجفيف لتجف في الهواء.


### [C] طريقة التطهير

١. اتبع خطوات التنظيف الموضحة من الخطوات [B] ١ إلى [B] ٥.
٢. قم بتعقيم الملحقات عن طريق غليها لمدة ٥-٣ دقائق.
٣. استخدم مقلاة كبيرة لمنع الملحقات من لمس قاع وجوانب المقلاة.
٤. بعد التطهير، ضع الملحقات على قطعة قماش نظيفة أو رف تجفيف لتجف في الهواء.

## تعليمات التشغيل

### [١] الأزرار والشاشة

- a.** مؤشر مستوى الشفط/مستوى البطارية: يُظهر قوة الشفط الحالية وحالة البطارية.
- b.** زر تقليل قوة الشفط: اضغط عليه لتقليل قوة الشفط.
- c.** زر زيادة قوة الشفط: اضغط عليه لزيادة قوة الشفط.
- d.** زر الطاقة: اضغط عليه لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- e.** مؤشر وضع الشفط

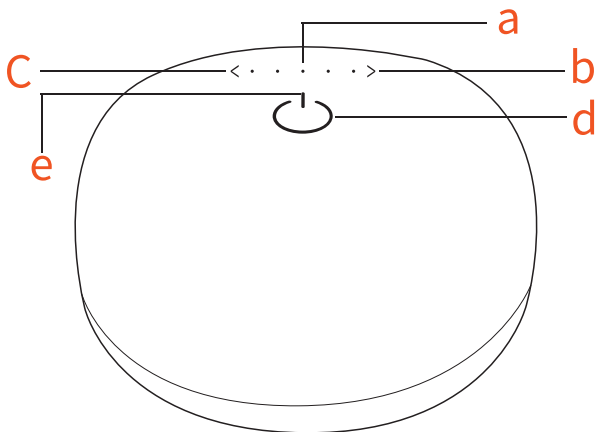

الضوء البرتقالي: يشير إلى وضع التحفيز.

الضوء الأخضر: يشير إلى وضع التعبير.

الضوء الأصفر المصفر: يشير إلى الوضع المختلط.

**f.** مؤشر الشحن

الضوء الأخضر الوامض: يتم شحن الجهاز.

الضوء الأخضر الثابت: الجهاز مشحون بالكامل.

## [٢] طريقة التشغيل


١. للتشغيل: اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة. ستعرض الشاشة في البداية مستوى البطارية، ثم يتم تعيينها افتراضيًا على آخر وضع شفت ومستوى تم استخدامه.
٢. لإيقاف التشغيل: اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة.
٣. لتغيير وضع الشفت: اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة.
٤. ضبط مستوى الشفت: يوفر كل وضع شفت خمسة مستويات من القوة.
- ٤.١ وضع التحفيز: اضغط على الزرين ">" أو "<" لزيادة أو تقليل قوة الشفت.
- ٤.٢ وضع التعبير: اضغط على الزرين ">" أو "<" لضبط قوة الشفت.
- ٤.٣ الوضع المختلط: اضغط على الزرين ">" أو "<" لتعديل قوة الشفت والتردد.
٥. التحقق من مستوى البطارية

**الطريقة ١:** اضغط باستمرار على الزرين ">" و"<" في نفس الوقت. سيومض مؤشر مستوى البطارية ثلاث مرات.


**الطريقة ٢:** سيومض مؤشر مستوى البطارية تلقائيًا ثلاث مرات عند تشغيل مضخة الثدي.

**نصائح:** إذا لم يتم استخراج حليب الثدي بسرعة، فلا تقلقي وحاولي الاسترخاء. إذا استمرت المشكلة لأكثر من ٥ دقائق، فتوقفي وحاولي مرة أخرى لاحقًا.


## دليل التجميع

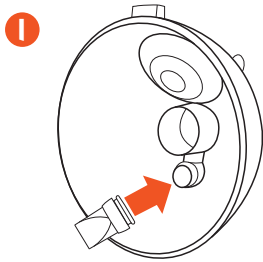


١ قم بوضع الصمام في الفتحة المخصصة له على جسم المضخة.

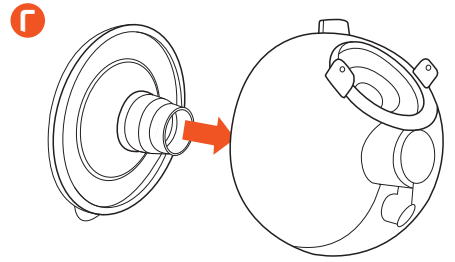

٢ قم بتركيب قرن السيليكون على الصمام الموجود بالفعل في المضخة.

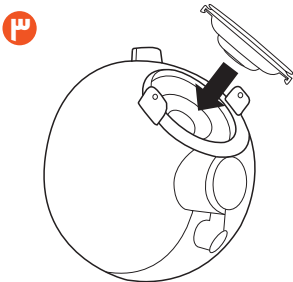


٣ ضع الحجاب الحاجز السيليكوني فوق التجميع.

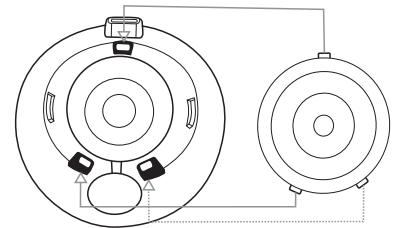


قم بتأمين مشبك الحجاب الحاجز السيليكوني للموصل لضمان الإغلاق المناسب.


٤

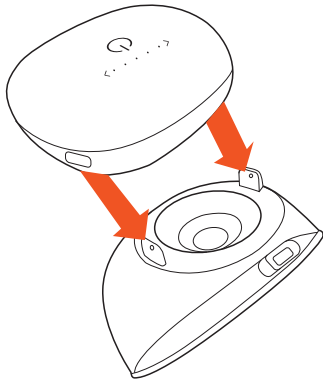


قم بربط وحدة مضخة المحرك بقاعدة  
الأجزاء المجهزة مع التأكد من تثبيتها بشكل  
آمن.

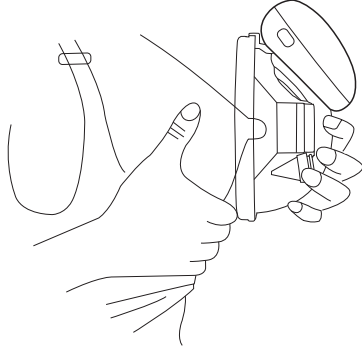

٥

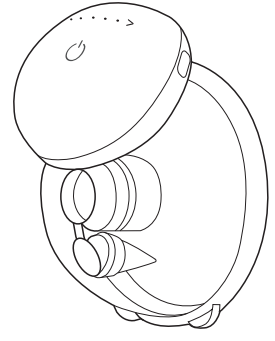

تأكد من أن جميع المكونات مجمعة  
بشكل صحيح ومثبتة بإحكام. يجب أن  
تكون مضخة الثدي مجمعة بالكامل الآن.

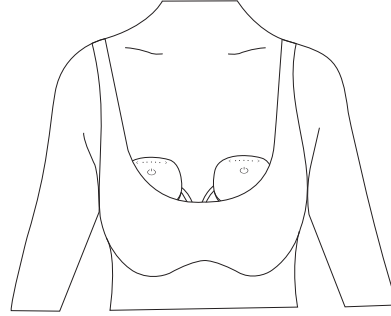

ضع مضخة الثدي المجمعة في الوضع المناسب على حمالة الصدر للاستخدام.

## أوضاع مختلفة مناسبة





المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**