



Green Lion

جهاز السمع الرقمي

SKU: GNINSAIDSBK
Model No: GL-HA2

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	نطاق الاستخدام
٣	تعليمات اللمس
٣	تشغيل المعينة السمعية
٤	التوصيل اللاسلكي
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	دليل تعديل المعينة السمعية
٧	الصيانة والعناية
٧	تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

توفر أجهزة السمع الرقمية Green Lion Inspire تضخيمًا صوتيًا متقدمًا مع تقنية مضادة للصفير لتحسين وضوح السمع. تتميز هذه الأجهزة بعمر بطارية يصل إلى ٣٦ ساعة، وتأتي في علبة شحن أنيقة لسهولة التخزين وراحة الاستخدام أثناء التنقل. مثالية لمن يبحثون عن تجربة سمعية فريدة، حيث توفر أجهزة Inspire تجربة سمع مريحة وسلسلة وعالية الجودة.

المواصفات

رقم الموديل	GL-HA٢
المادة	ABS
العلبة	٦٥٠ مللي أمبير/ساعة
البطارية	٥٠ مللي أمبير/ساعة
بطارية سماعات الأذن	١٠٧ ديسيبيل
أقصى خرج صوت	حتى ٣٠ ديسيبيل
مضخم الصوت	≥٢٥ ديسيبيل
مستوى الضوضاء (EIN)	٥ مراحل
التحكم في مستوى الصوت	٧٥,٣
بلوتوث	١.٠ أمتار
نطاق الإرسال	USB-C
منفذ الشحن	١,٥ ساعة
مدة الشحن	٦ ساعات
مدة التشغيل لمرة واحدة	٣٦ ساعة
وزن المنتج	٦٢ غرام
أبعاد المنتج	٣٥,٧*٣٥,٨*٦٤ مم

نطاق التطبيق

صُممت هذه المعينة السمعية لمساعدة المرضى الذين يعانون من فقدان السمع بالتوصيل الهوائي بعد جلسات العلاج المهني. لا يُنصح باستخدامها للأشخاص الذين يعانون من التهاب الأذن الخارجية الحاد، أو التهاب طبلة الأذن، أو التهاب الأذن الوسطى، أو من يعانون من حساسية تجاه المواد المستخدمة في الجهاز. يستخدم المنتج طريقة رقمية لمعالجة الإشارات، حيث يُحوّل إشارة الصوت المُستقبلية (التناظرية) إلى إشارة رقمية. بعد المعالجة والتضخيم، تُحوّل مرة أخرى إلى إشارة صوتية تناظرية لإخراجها.

تعليمات اللمس

١. التشغيل/الإيقاف المؤقت:

اضغط مطولاً على الزر الأيسر/الأيمن.

٢. ضبط مستوى الصوت:

٢.١ رفع مستوى الصوت: اضغط مطولاً على الزر الأيسر/الأيمن.

٢.٢ خفض مستوى الصوت: انقر نقرًا مزدوجاً على الزر الأيسر/الأيمن.

٣. المكالمات

٣.١ الرد على مكالمة: اضغط مطولاً على الزر الأيسر/الأيمن.

٣.٢ إنهاء مكالمة: اضغط مطولاً على الزر الأيسر/الأيمن.

٣.٣ رفض مكالمة: انقر مطولاً على الزر الأيسر/الأيمن.

ملاحظة: هذه العمليات متاحة فقط عند اتصال الجهاز لاسلكياً.

تشغيل المعينة السمعية

١. أخرج المعينة السمعية من علبة الشحن. سيعمل المنتج تلقائياً. بعد ١٥ ثانية، ستبدأ

المعينة السمعية في مساعدة السمع.

٢. جدول عمليات تغيير مستوى الصوت والوضع

نغمة تنبيه	لتشغيل	مفتاح
الحد الأدنى لمستوى الصوت	انقر على اليسار/اليمين	مستوى الصوت ١
المستوى ٢	انقر على اليسار/اليمين	مستوى الصوت ٢
المستوى ٣	انقر على اليسار/اليمين	مستوى الصوت ٣
المستوى ٤	انقر على اليسار/اليمين	مستوى الصوت ٤
الحد الأقصى لمستوى الصوت	انقر على اليسار/اليمين	مستوى الصوت ٥
وضع إلغاء الضوضاء القوي	انقر على اليسار/اليمين	وضع إلغاء الضوضاء القوي
الوضع الداخلي	انقر نقرًا مزدوجًا على اليسار/اليمين	الوضع الداخلي
الوضع الخارجي	انقر نقرًا مزدوجًا على اليسار/اليمين	الوضع الخارجي

٣. إيقاف تشغيل الجهاز لإيقاف تشغيل الجهاز، ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن، أو اضغط مطولاً على منطقة اللمس الخاصة بسماعات الأذن خارج العلبة لمدة ٦ ثوانٍ لإيقاف تشغيلها بشكل فردي.

الاتصال اللاسلكي

يمكن توصيل سماعة الأذن بميزة الاتصال اللاسلكي في الهاتف المحمول لاستخدامها كسماعات أذن لاسلكية دون الحاجة إلى سماعة أذن. اتبع الخطوات التالية:

١. أخرج سماعات الأذن وانتظر الاقتران اللاسلكي. سيومض مؤشر الضوء الأبيض/الأزرق بالتناوب.

٢. ابحث عن اسم السماعة اللاسلكية "GL-HA٢" في إعدادات الاتصال اللاسلكي في الهاتف المحمول. بعد نجاح الاقتران، سيومض مؤشر الضوء الأبيض ببطء ثم ينطفئ، مع صوت تنبيه يفيد "تم الاتصال".

ملاحظة:

١. عند توصيل وضع الاتصال اللاسلكي وعدم وجود صوت من الجهاز اللاسلكي، ستنتقل سماعة الأذن تلقائيًا إلى وضع الاتصال اللاسلكي في غضون ٥ ثوانٍ تقريبًا.

٢. في حال صدور صوت من الجهاز اللاسلكي، ستغادر سماعة الأذن وضع الاتصال اللاسلكي فورًا وتنتقل إلى الوضع اللاسلكي.

المشكلة	السبب والحل
مشكلة في الاتصال اللاسلكي (سماعة أذن واحدة فقط متصلة أو لا يوجد اتصال)	قد تكون سماعات الأذن متصلة بجهاز مُقترن سابقًا. الحل: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط في علبة الشحن لمسح التوصيلات السابقة، ثم أعد إقران سماعات الأذن بالجهاز المطلوب.
صرير أو ضوضاء	الأسباب المحتملة: - تداخل من مجال مغناطيسي قوي. - وضع سماعة الأذن بشكل غير صحيح. - وضع سماعة الأذن بشكل غير صحيح. الحل: - ابتعد عن المجالات المغناطيسية القوية. - تأكد من أن أطراف سماعات الأذن بالحجم الصحيح وأنها تُغلق قناة الأذن بشكل صحيح. - تأكد من وضع سماعة الأذن بشكل صحيح في الأذن.
صوت ضعيف أو غير واضح	الأسباب المحتملة: - انخفاض شحن البطارية. - سماعة أذن غير مناسبة. - جسم غريب يعيق سماعة الأذن. الحل: - تأكد من شحن الجهاز بالكامل وحاول مرة أخرى. - ارفع مستوى الصوت. - تحقق من عدم وجود أي شوائب تعيق سماعة الأذن، وتأكد من تثبيتها بإحكام في الأذن.

دليل تكييف المعينة السمعية

<p>المرحلة ١</p>	<p>التأقلم الأولي</p> <p>ابدأ بالتأقلم مع الأصوات في بيئتك المباشرة، مثل المحادثات، ومكيفات الهواء، وخزير الماء من الصنابير. يُنصح بإجراء محادثات عن بُعد للتكيف تدريجيًا مع تجربة السمع الجديدة.</p>
<p>المرحلة ٢</p>	<p>استكشاف الأماكن الخارجية</p> <p>جرب المشي في حيّك أو حديقة قريبة لمراقبة كيفية إدراكك للأصوات عن بُعد. قد تلاحظ تحسنًا في سمعك للأصوات التي كانت أقل وضوحًا سابقًا. خلال هذه المرحلة، يُنصح بارتداء المعينات السمعية لمدة تصل إلى ٤ ساعات يوميًا لمدة أسبوع على الأقل.</p>
<p>المرحلة ٣</p>	<p>التواجد في الأماكن العامة</p> <p>يمكنك البدء باستكشاف بيئات أكثر ازدحامًا، مثل الأسواق المحلية ومراكز التسوق. مارس أنشطة تُمكنك من سماع الأصوات بوضوح، مثل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو التفاعل الاجتماعي. خلال هذه المرحلة، احرص على ارتداء المعينات السمعية لمدة ٦ ساعات على الأقل يوميًا لتجنب التعب وضمان ضبطها بشكل مثالي.</p>
<p>المرحلة ٤</p>	<p>الاندماج الكامل في الحياة اليومية</p> <p>في هذه المرحلة، يُفترض أن تكون قادرًا على ارتداء سماعات الأذن بشكل مريح لمدة ٨ ساعات أو أكثر يوميًا. يمكنك الانغماس الكامل في بيئات صوتية معقدة، مثل مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الموسيقى والتسوق من البقالة. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها سماعات أذن، فقد تشعر في البداية ببعض الانزعاج أو شعورًا بامتلاء الأذنين. بالإضافة إلى ذلك، يُعد سماع صوتك المُضخم أمرًا شائعًا. هذه عملية طبيعية، وقد تستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر للتكيف الكامل.</p>

الصيانة والعناية

١. تنظيف سدادات الأذن


لتنظيف سدادات الأذن، انزعها بعناية من أجهزة السمع. اشطفها بالماء النظيف أو امسحها بمناديل مبللة بالكحول. بعد التنظيف، تأكد من جفاف سدادات الأذن تمامًا قبل إعادة تركيبها في أجهزة السمع.

٢. تنظيف الجهاز

للتعامل مع جهاز السمع، استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر، أو قطعة قطن جافة، أو إسفنجة ناعمة لمسح أي شحوم أو رطوبة على السطح الخارجي. توخَّ الحذر الشديد لمنع دخول السوائل إلى الجهاز، بما في ذلك علب الشحن.

٣. تركيب سدادات الأذن

يمكن للمستخدمين اختيار سدادات الأذن التي تناسب شكل أذنه (على سبيل المثال، بناءً على خبرتهم بحجم قناة الأذن أو إذا كانت سدادات الأذن تميل إلى السقوط). اختر من بين الأحجام الثلاثة المتاحة: كبير (L)، متوسط (M)، وصغير (S). بعد اختيار الحجم المناسب، ثبت سدادات الأذن في أجهزة السمع من منفذ الصوت.

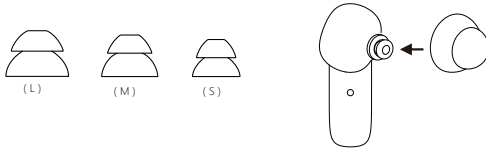

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

١. ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا.

٢. أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

تحذير: أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية؛ ولّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركَّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعيّن.

إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

١. أعد توجيه هوائي الاستقبال أو غير مكانه.
 ٢. زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 ٣. وُصل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 ٤. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للمساعدة.
- تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات الراديوية العامة. ويمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)