



Green Lion

**تسخين سريع
وسادة تدفئة الدورة الشهرية**

SKU: GNRPDMEPADWH

Model No: GL-MP30

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات السلامة
٦	وظائف الأزرار
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

توفر وسادة التدفئة السريعة من Green Lion للحيز راحة سريعة وفعالة بفضل موصليتها الحرارية المتقدمة. تتميز بتسخين فوري خلال ٣ ثوانٍ فقط، مما يضمن راحة فورية، وتوفر أربعة أوضاع تدفئة قابلة للتعديل لتناسب التفضيلات الفردية. تأتي وسادة التدفئة مزودة بشاشة عرض فورية، مما يسمح للمستخدمات بمراقبة الإعدادات بسهولة. كما تتضمن وظيفة إيقاف تشغيل تلقائي بعد ٣٠ دقيقة لضمان السلامة وكفاءة الطاقة. تعمل الوسادة ببطارية سعة ٤٠٠٠ مللي أمبير، وتوفر ما يصل إلى أربع ساعات من الاستخدام المتواصل، ويمكن شحنها عبر منفذ USB-C. يُناسب الحزام القابل للتعديل مقاسات الخصر من ٧٠ إلى ١٢٠ سم، مما يضمن ملائمة مريحة وأمنة لجميع المستخدمين.

المواصفات

رقم الموديل	GL-MP٣.
المادة	بلاستيك ABS + سبيكة ألومنيوم
سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير
الطاقة	٧ واط
الجهد	٥ فولت
مدة التسخين	٨-٣ ثوانٍ
أنماط التسخين	٤ مستويات

درجة حرارة التسخين	٥٥-٥٠-٤٥-٤٠ درجة مئوية
أنماط الاهتزاز	٤ مستويات
نطاق الاهتزاز في الدقيقة	٦٠٠-٤٠٠
حزام قابل للتعديل	١٢٠-٧٠ سم
إيقاف التشغيل التلقائي	٣٠ دقيقة
مستوى الضوضاء	٤٠-٢٠ ديسيبل
منفذ الشحن	USB-C
مدة الشحن	٣ ساعات
مدة التشغيل	٤ ساعات
وزن المنتج	١٩٠ غرام
أبعاد المنتج	٢٠٠ x ٨٥ x ٤٠ مم

مميزات المنتج

١. تسخين سريع (٨-٣ ثوانٍ): تسخن وسادة التدفئة بسرعة خلال ٨-٣ ثوانٍ، مما يوفر راحة فورية عند الحاجة إليها.
٢. أربعة أوضاع تسخين قابلة للتعديل: خصص تجربتك مع أربعة أوضاع تسخين مختلفة، توفر نطاقًا من درجات الحرارة من ٤٠ درجة مئوية إلى ٥٥ درجة مئوية

لتخفيف الألم بشكل شخصي.

٣. أربعة أوضاع اهتزاز: اختر من بين أربعة أوضاع اهتزاز لتعزيز الراحة والاسترخاء، بما يتناسب مع تفضيلاتك لمزيد من الراحة المهدئة.

٤. شاشة عرض فورية: تعرض الشاشة المدمجة الإعدادات الحالية، مما يسمح بسهولة مراقبة وضبط مستويات الحرارة والاهتزاز.

٥. عمر بطارية طويل (٤ ساعات): مزودة ببطارية ٤٠٠٠ ملي أمبير، توفر وسادة التدفئة ما يصل إلى ٤ ساعات من الاستخدام المتواصل بشحنة كاملة، مما يضمن راحة تدوم طويلًا.

٦. شحن USB-C: اشحن الجهاز بسهولة باستخدام منفذ USB-C الذي يتيح الشحن السريع (٣ ساعات) والتوصيل السهل بالأجهزة المتوافقة.

٧. خاصية الإيقاف التلقائي: يتم إيقاف تشغيل الوسادة تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة لضمان السلامة ومنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الاستخدام المطول.

٨. حزام قابل للتعديل (١٢٠-٧٠ سم): يضمن الحزام القابل للتعديل ارتداءً مريحًا وآمنًا لمختلف أحجام الخصر، مما يوفر تنوعًا وراحة لجميع المستخدمين.

٩. تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن: بوزن ١٩٠ غرامًا فقط وأبعاد ٨٥x٤٠x٢٠ مم، تتميز وسادة التدفئة بخفة وزنها وسهولة حملها وارتدائها، وهي مثالية للاستخدام أثناء التنقل.

تعليمات السلامة

١. لا تستخدمه أثناء النوم: أطفئ الجهاز دائمًا قبل النوم لتجنب الاستخدام المتواصل، الذي قد يسبب عدم الراحة أو ارتفاع درجة الحرارة.

٢. تجنب البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة: غير وضعيتك بانتظام أثناء استخدام الجهاز. افحص بشرتك باستمرار، وإذا لاحظت أي مشاكل، انزع الجهاز فورًا.


٣. احفظه بعيدًا عن النار والبيئات الضارة: لا تستخدم الجهاز أبدًا بالقرب من النار أو السوائل المسببة للتآكل أو في أماكن غير آمنة.

٤. راقب الجهاز أثناء الاستخدام: استخدم الجهاز دائمًا في مكان آمن مع مراقبة الجهاز وحالة بشرتك.
٥. تجنب الرطوبة: لا تستخدم الجهاز في ظروف رطبة، مثل أثناء الاستحمام أو في أماكن ذات رطوبة عالية، لمنع التلف أو التعطل.
٦. استخدم الشاحن المناسب: استخدم فقط شاحن USB-C المرفق، وتأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام. تجنب استخدامه أثناء الشحن.
٧. التخزين الآمن: عند عدم الاستخدام، يُحفظ الجهاز في مكان بارد وجاف لحمايته من درجات الحرارة القصوى والرطوبة.

ملاحظات هامة

١. مرضى القلب: هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأفراد المصابين بأمراض القلب أو أي حالات مرضية متعلقة بالقلب.
٢. الأشخاص الذين يعانون من جروح جلدية أو مشاكل جلدية: تجنب استخدام الجهاز إذا كان لديك أي جروح جلدية لم تلتئم أو مشاكل جلدية.
٣. مرضى النقرس: لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأفراد الذين عانوا من النقرس أو لم يتعافوا منه تمامًا.
٤. النساء الحوامل والمصابات بأورام عنق الرحم: هذا الجهاز غير يوصى باستخدامه من قبل النساء الحوامل أو المصابات بأورام عنق الرحم.



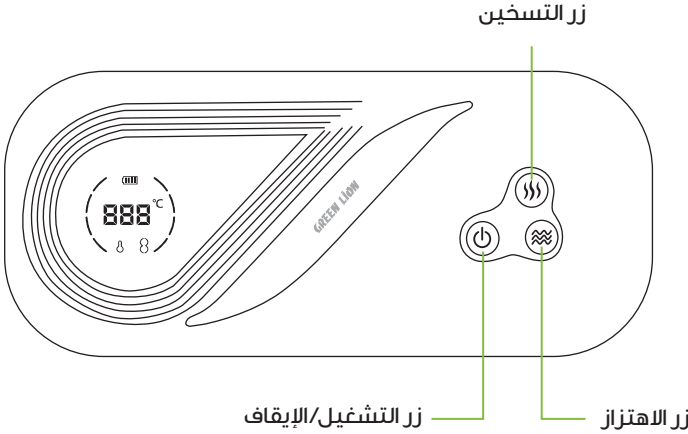

١. تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
٢. زر الاهتزاز: اضغط ضغطة قصيرة لضبط قوة الاهتزاز، مع أربعة مستويات للضبط.
٣. زر التسخين: اضغط ضغطة قصيرة لضبط درجة الحرارة، مع أربعة مستويات لتغيير درجة الحرارة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - ١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و
 - ٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال.

استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)